

# Bedrukte mondkapjes met NEN-norm



# Bedrukte mondkapjes met NEN-norm

Drukwerkdeal.nl is de eerste aanbieder van Nederland van mondkapjes die voldoen aan de nieuwe NEN-norm voor publiek gebruik. De nieuwe norm helpt consumenten, bedrijven en instanties een eenvoudige keuze te maken voor mondkapjes die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Om aan de NEN-norm te voldoen, worden onze mondkapjes in een onafhankelijk laboratorium getest.

## Over de NEN-norm

Mondkapjes die voldoen aan de nieuwe NEN-norm voor publiek gebruik, worden onder andere getest op pasvorm, materiaalgebruik, ademweerstand en de mate waarin het materiaal besmette druppels uit mond en neus tegenhoudt. De norm van deze filtratie-efficiëntie is 70%. De filtratie-efficiëntie van de mondkapjes met NEN-norm die Drukwerkdeal.nl aanbiedt loopt op van 74% tot 98%. Om te voldoen aan de NEN-norm laten wij alle modellen mondkapjes testen in een onafhankelijk laboratorium.

## Modellen



### Budget mondkapjes

Deze tweelaags mondkapjes bedrukken we vanaf 25 stuks. Het mondkapje heeft een rechte vorm en een neusbrug zodat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Het mondkapje bevestig je eenvoudig achter je oren met twee elastieken. De mondkapjes zijn volledig bedrukbaar aan de buitenzijde. De maximale gebruiksduur is vier uur, waarna de mondkapjes opnieuw gebruikt kunnen worden na een wasbeurt op 60 graden.

- Tweelaags
- Filtert 98% van de lucht
- Filtratie-efficiëntie: 81,5% (norm is >70%)
- Wasmachinebestendig
- Levertijd: vanaf 5 werkdagen



### Budget Shape mondkapjes

Deze tweelaags mondkapjes bedrukken we vanaf 25 stuks en vallen onder onze budgetreeks. Het mondkapje is voorgevormd en heeft een elastiek om te bevestigen achter het hoofd. Dit mondkapje bewijst dat voordelig, veilig en stijlvol prima samengaan! Bedenk een uniek design en laat deze mondkapjes volledig aan de buitenzijde bedrukken. De Budget Shape mondkapjes draag je maximaal vier uur en was je daarna op 60 graden.

- Tweelaags
- Filtert 90% van de lucht
- Filtratie-efficiëntie: 81,5% (norm is >70%)
- Wasmachinebestendig
- Levertijd: vanaf 5 werkdagen



### Basic mondkapjes

Op zoek naar 'gewoon' een mondkapje, maar wel eentje die leuk staat en wat langer meegaat? Laat mondkapjes bedrukken met eigen logo of ontwerp een opvallend design. De mondkapjes bedrukken we namelijk niet alleen op de wang, maar op de volledige voorzijde! Zo maak je bedrukte mondkapjes een aanvulling op je outfit. Ga altijd comfortabel en veilig op pad met jouw bedrukte mondkapje. Want met een gebruiksduur van acht uur kun je zorgeloos een hele dag de deur uit. Hierna was je het mondkapje op 60 graden tot wel 25 keer en maken ze eenmalige mondkapjes overbodig. Een stuk duurzamer dus!

- Tweelaags
- Filtert 90% van de ingeademde lucht
- Filtratie-efficiëntie: 81,5% (norm is 70%)
- Wasbaar tot wel 25 keer op 60 graden
- Levertijd: vanaf 5 werkdagen



### Fashion Premium mondkapjes

Fashion Premium mondkapjes bieden door de OEKO-TEX®-standaard materiaal en een metalen neusbrug langdurig draaggemak. De mondkapjes zijn volledig te bedrukken en verder te personaliseren met een zwarte of witte bies. Bij bestellingen vanaf 250 stuks kan de bies ook bedrukt worden. De Fashion Premium mondkapjes draag je maximaal vier uur en was je daarna op 60 graden.

- Drielaags
- Filtert 98% van de lucht
- Filtratie-efficiëntie: 81,5% (norm is >70%)
- Voldoet aan de NEN-norm
- Levertijd: vanaf 5 werkdagen

### Aanvullende informatie NEN-norm

De NEN-norm is een norm voor niet-medische mondmaskers. Met de NEN-norm weet je zeker dat je mondkapje voldoende bescherming biedt tegen de verspreiding van besmette druppels uit mond en neus.

Omdat voor niet-medische mondkapjes geen wettelijke eisen gelden voor de kwaliteit en bescherming die ze bieden, is daar een norm voor ontwikkeld. Zo is het voor jou als koper van mondkapjes direct duidelijk of je mondkapje voldoet aan de eisen die de NEN stelt.

### Wat is de NEN?

NEN is een afkorting van de Nederlandse Norm. De NEN is een onafhankelijke partij die normen ontwikkelt voor de kwaliteit en veiligheid van producten, werkwijzen en diensten.

## Aan welke eisen moet een mondkapje voldoen voor een NEN-norm?

- Het mondkapje sluit goed aan op het gezicht. Uitgeademde lucht wordt door het materiaal gefilterd en gaat naar buiten.
- Het mondkapje voelt prettig aan en veroorzaakt geen irritatie.
- Je kunt goed ademen door het mondkapje.
- Het mondkapje houdt minstens 70% van de 3 µm (micrometer) of grotere deeltjes tegen. Dit noem je de filtratie-efficiëntie. Sommige aanbieders communiceren ook een percentage aan gefilterde lucht. Verwar dat niet met de filtratie-efficiëntie. De hoeveelheid gefilterde lucht zegt niets over de filtratie-efficiëntie.
- Het mondkapje heeft geen ventiel of andere opening waardoor ongefilterde lucht kan ontsnappen.
- In het mondkapje mogen geen stoffen verwerkt zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

## Onderhoud van herbruikbare mondkapjes

Herbruikbare mondkapjes maak je schoon voor een volgende ronde met deze wasvoorschriften.

- Was het mondkapje na ieder gebruik op minimaal 60°C en op een volledig programma.
- Gebruik alleen wasmiddel en geen wasverzachter.
- Was je handen nadat je je mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.

## Levensduur herbruikbare mondkapjes

Per type mondkapje geven we aan hoe vaak het gewassen mag worden voor je het weg moet gooien. Ook is een mondkapje niet meer te gebruiken als:

- het beschadigd is;
- het niet meer goed aansluit op het gezicht (door bijvoorbeeld uitgerekte elastiek);
- het versleten is;
- je er niet meer goed door kunt ademen.

## Zo zet je een mondkapje veilig op (en af)



Was je handen voor je je mondkapje opzet.



Raak tijdens het opzetten alleen het elastiek aan.



Heeft het mondkapje een neusbeugel? Buig deze dan met twee vingers om je neus.



Zorg dat je neus, mond en kin goed bedekt zijn. Raak ze niet meer aan nadat je je mondkapje opgedaan hebt.



Draag het mondkapje maximaal vier uur.




Schuif het mondkapje niet aan de kant om bijvoorbeeld te eten of drinken. Wil je toch eten of drinken? Zet dan het mondkapje helemaal af. Hoe dat moet zie je in stappen 7 t/m 10.



Was je handen voor je het mondkapje afzet.



Raak tijdens het afzetten alleen het elastiek aan.

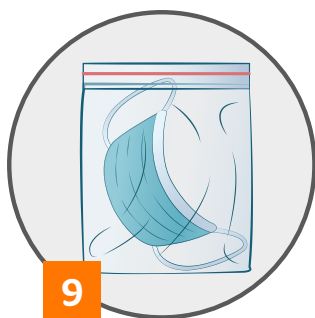

Bewaar schone en gebruikte mondkapjes gescheiden van elkaar in afsluitbare bakjes of zakjes.



Was je handen nadat je je mondkapje afgezet hebt.

## Bijlages

**NEN-spec 1-1** - Aanbevelingen voor ontwerp, gebruik en onderhoud

**NEN-spec 1-2** - Eisen voor fabrikanten en importeurs